


OmniSuit


Instructions de Lavage

AUXIVO


AUXIVO

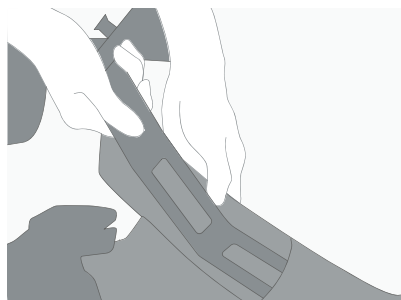


Séparez les textiles, les EES dorsaux et les parties rigides avant le lavage.

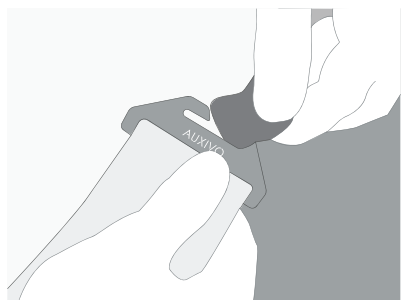


Retirez l'EES en tirant la bande textile d'un côté du crochet métallique.

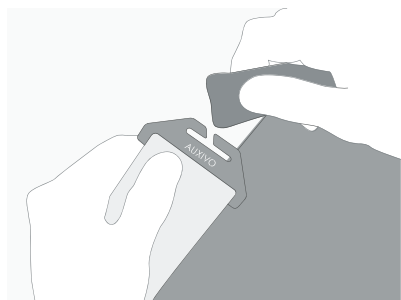


Lorsque la bande textile glisse hors du crochet, tirez dessus. Répétez l'opération pour les autres raccords.

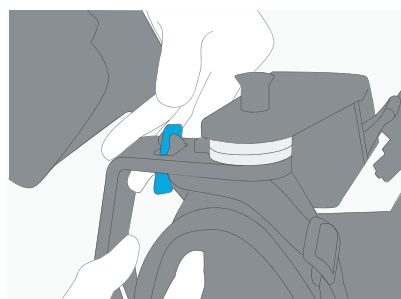


Inclinez et poussez la boucle d'épaule par la fente de la structure du dos.

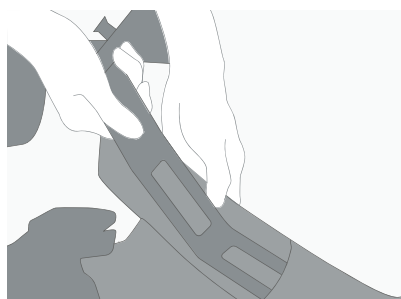

Retirez la structure dorsale du gilet.

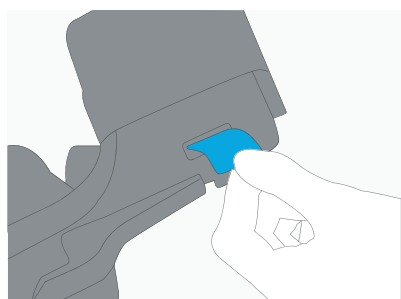

Détachez la bande Velcro située sous le brassard, afin de détacher le coussinet du brassard.

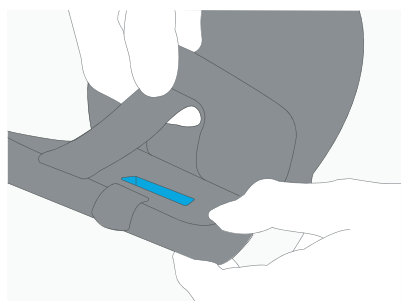

Retirez le coussinet du brassard.




Essayez toutes les parties non textiles avec un chiffon humide et séchez à l'air libre.



Fermez tout les boucles et les velcros du gilet, et placez-le dans un sac de lavage.




Lavez à 30°C en utilisant un détergent doux. N'utilisez pas d'assouplissant. Laver séparément.

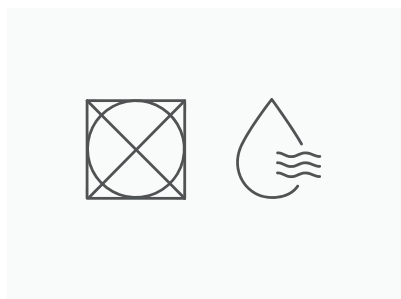


Faire sécher les textiles à l'air libre. Assurez-vous qu'il est complètement sec avant de l'utiliser.




Remontez l'exosquelette (page de garde) et effectuez un contrôle visuel conformément au manuel d'utilisation.

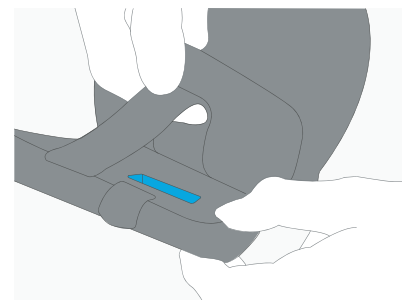


Fixez à nouveau les coussinets sur les brassards et fermez les bandes velcro.

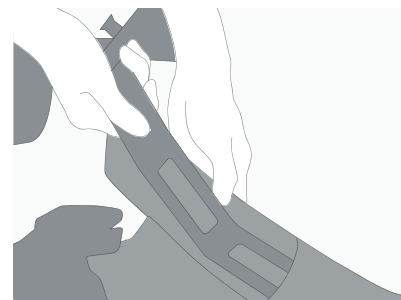


Réintroduire la structure dorsale dans le gilet.

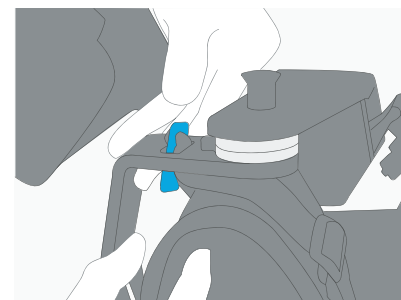


Refixer la structure dorsale avec la boucle d'épaule à travers la fente.

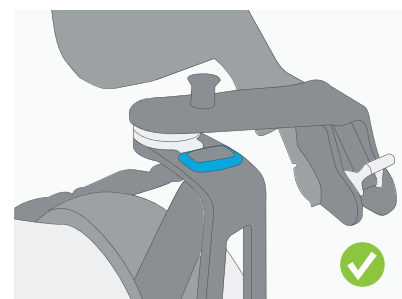


Vérifiez que la connexion entre la structure dorsale et le gilet est bien fixée par la boucle.

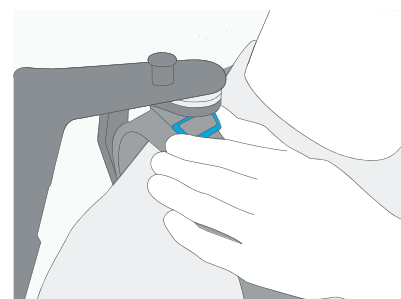


Faites glisser la boucle de l'épaule vers le haut pour augmenter la stabilité du mécanisme de l'épaule.

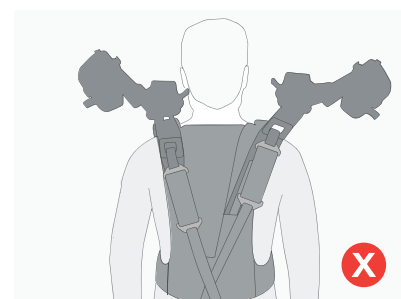


Assurez vous que la structure dorsale est bien insérer dans le fond de la poche et que l'OmniSuit est bien symétrique.

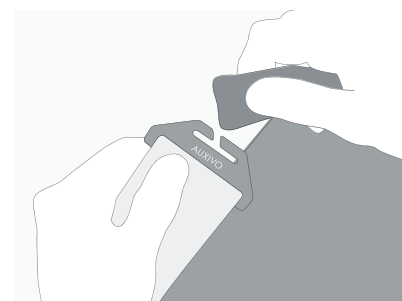


Commencez par insérer le côté le plus long du crochet EES dans la boucle de la sangle de connexion supérieure.

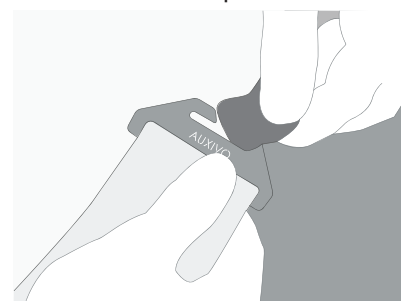


Puis serrez la boucle sur le côté le plus court du crochet. Répétez le processus pour les autres raccords.

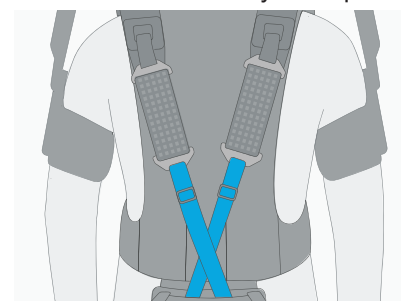


Prenez la sangle du cuissard opposé, de manière à ce que les sangles se croisent au niveau du bas du dos de l'utilisateur.

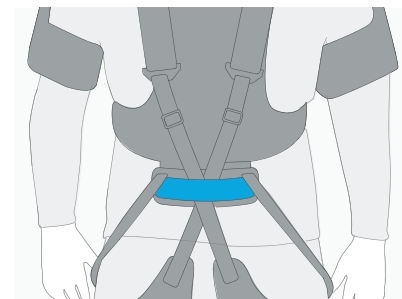

Assurez-vous que les sangles de liaison passent par le tunnel de la ceinture de hanches.

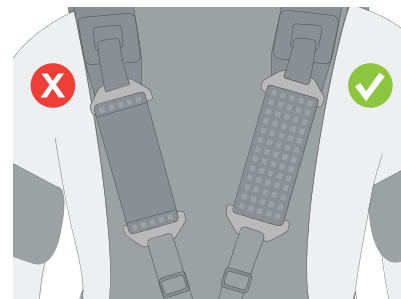

Veillez à ce que les côtés à motifs noirs et blancs des élastiques soient tournés vers vous.

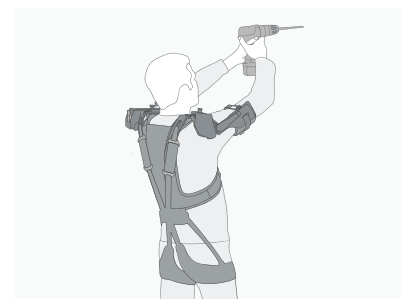

Après une inspection visuelle, l'OmniSuit est à nouveau prêt à l'emploi.